

Instrukcja montażu i obsługi

Uchwyt półokrągły uchylny z płytą

Model 828CC



BEZ BARIER

BEZ BARIER

I. Dane techniczne /Rys. A/

Szerokość maksymalna	96 [mm]
Odległość od ściany po rozłożeniu	600 [mm]
Wysokość uchwytu	212 [mm]
Wymiar od ściany po złożeniu	230[mm]
Regulacja opadania uchwytu	płynna
Dopuszczalne obciążenie	120 [kg]
Waga netto	2,8[kg]

II. Zastosowanie

Uchwyt półokrągły uchylny z płytą wykonany został z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach panujących w łazienkach. Może on znaleźć zastosowanie również w gabinetach lekarskich, szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych. Poprzez zastosowanie uchwytu półokrągłego uchylnego, kompensowane jest upośledzenie narządów ruchu, a w szczególności kończyn dolnych. Uchwyt półokrągły uchylny ma możliwość złożenia, co znacznie zwiększa komfort jego użytkowania.

III. Budowa /Rys. B i C/

1. Stelaż uchwytu półokrągłego uchylnego z płytą
2. Płyta nośna uchwytu
3. Zaślepka stelażu PCW /PVC/
4. Śruba mocująca
5. Nakrętka samohamowna

IV. Montaż /Rys. D/




Zalecany jest montaż uchwytu półokrągłego uchylnego z płytą do ściany pełnej. W przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwory należy wiercić bez udaru. Otwory po wierceniu należy oczyścić z pyłu oraz zwiercić. Uchwyt uchylny przykręcić do ściany przy pomocy 6 wkrętów poz. 6 i kołków rozporowych poz. 7 załączonych w zestawie. Po przykręceniu uchwytu, na wkręty nałożyć zaślepki poz. 8 dołączone w zestawie. Nie wolno mocować uchwytu ściennie-podłogowego bezpośrednio do płyty kartonowo - gipsowych !

V. Obsługa i eksploatacja /Rys. C/

1. Przed użytkowaniem uchwytu półokrągłego uchylnego z płytą należy zwrócić uwagę na stan techniczny i pewność zamocowania do ściany.
2. Uchwyt półokrągły uchylny z płytą po zamontowaniu do ściany należy odpowiednio wyregulować. W tym celu należy śrubę poz. 4 przytrzymać kluczem ampułowym "6" i dokręcić lub odkręcić nakrętkę samohamowną poz. 5 kluczem sztorcowym "13" tak, by uchwyt opadał powoli.

BEZ BARIER

BEZ BARIER

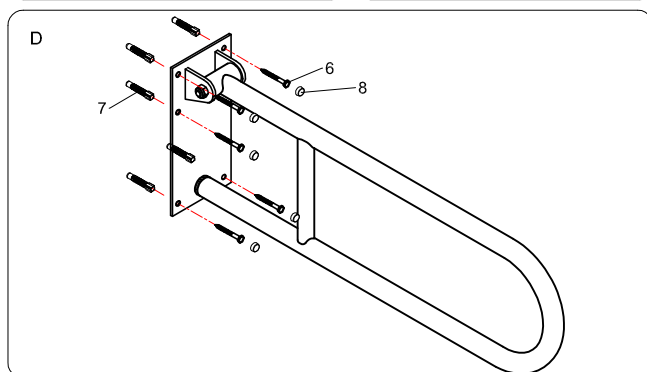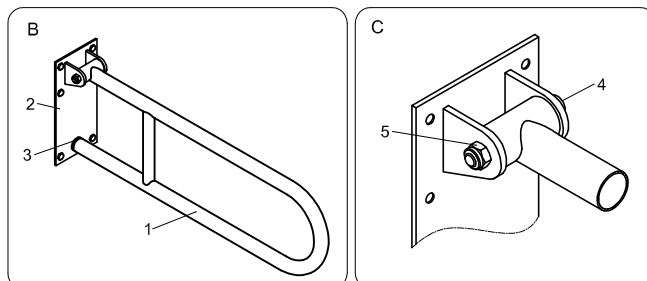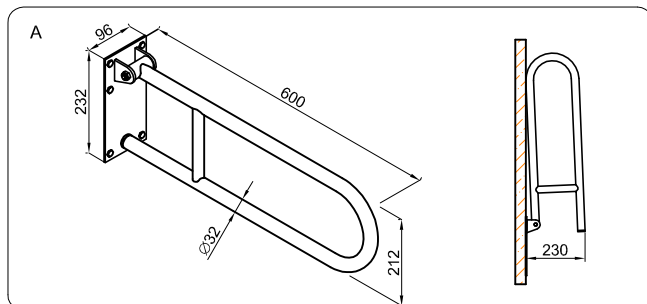

3. Zaleca się okresowe sprawdzenie prawidłowego zamocowania uchwytu uchylnego z płytą.
4. W przypadku widocznej szczeliny pomiędzy płytą nośną a ścianą należy dokręcić wkręty mocujące poz. 6.

VI. Konserwacja

1. Stal nierdzewna Inox charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na czynniki działające w trakcie normalnej eksploatacji. Nie traci swego połysku i gładkości powierzchni, pod warunkiem systematycznej konserwacji przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Należy używać środków przeznaczonych do czyszczenia szkła, ale nie zawierających chlorków. Powierzchnie bardzo zaniebane mogą być czyszczone przy użyciu środków do polerowania metali. Niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających chlor, a w szczególności kwas solny. Może to prowadzić do przeżółcenia powierzchni lub pojawienia się rdzawych plam.
2. Do zwykłego zabrudzenia stosować mokrą tkaninę, do bardziej opornego - nylonowe gąbki. Nie wolno stosować stalowych poduszek i szczotek drucianych do szorowania, aby uniknąć porysowania powierzchni i zanieczyszczenia cząsteczkami żelaza.
3. Środki zastosowane do konserwacji uchwytu uchylnego, powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Użytkować uchwyt uchylny z płytą zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Czyszczenie uchwytu ze stali nierdzewnej winno być dokonywane zanim nagromadzone zanieczyszczenia lub odciski palców staną się widoczne, dla zminimalizowania pracochłonności i kosztów czyszczenia.